

取扱説明書

〈はじめてお使いいただく皆様へ 重要なお知らせ〉

事例

01

正しくお使いいただく
ために必ず
行ってください

作業を開始する前にシリコンスプレーを吻合部位プレートの裏（ビン）側、またはベース（裏側）に塗布してください。摩擦を感じず、安定した操作性と納まりの良さ（精密さ）を実感していただけます。




シリコン（離型剤）塗布

point1 シリコンスプレーのご使用は、バキューム吸引しながらティッシュケース等の箱の中で塗布されますと周囲を汚しません。

point2 歯科模型は強制的に十分乾燥させてから瞬間接着剤をお使いください。併せて維持穴を彫ることで外れません。歯科模型の乾燥が不十分だと外れる原因になります。

事例

02

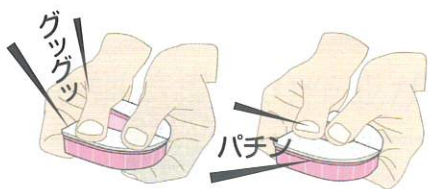

① 頬側を絞合させる ② 舌側を絞合させる

point1 浮き上がったままで模型を張り付けるとコンタクトが安定しません。

→ 強制的に乾燥させた印象模型を張り付けます。

事例


03

樹脂専用プライマーをご使用の場合は、瞬間接着剤をご使用前にプレート表面に塗布しておきます。（表面が乾いてしまっても効果は変わりません。瞬間接着剤を塗布した歯形模型を置いた瞬間に固まります。）

point1 ゆっくりと貼り付け作業を行いたい場合には樹脂専用プライマーはご使用されずに接着して下さい。この時表面が硬化しても、規定面のアンダーカット部に流し込んだ瞬間接着剤が硬化するまで暫くお待ちください。

事例

04

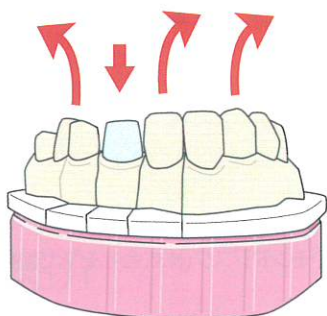

point1 ベースの1つを切断専用としていただくと納品時に模型がきれいです。浮き上がったままで模型を張り付けるとコンタクトが安定しません。顎舌側ともにご確認ください。

point2 支台歯はしっかり絞合させた後は動かしません。（支台歯部分を複式模型とお考えください）

New!! 新製品



point1 便利なスタンドをお使いください。シリコンスプレーの効果でワンプッシュで簡単に抜き取ることが出来ます。

